

# MEDICAL ICE

GHIACCIO ISTANTANEO BUSTA

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE IIA

GHIACCIO ISTANTANEO

IN BUSTE MONOUSO TNT

SCHEDA TECNICA 01-06-2021

## DESCRIZIONE

**MEDICAL ICE** è una pratica busta in TNT in grado di fornire immediatamente ed in modo autonomo basse temperature, in tutti quei casi in cui si necessita una pronta applicazione del "freddo".

## CARATTERISTICHE

**Busta esterna** in TNT con tre termosaldature in modo da garantire la resistenza, la termosaldabilità e l'impermeabilità. TNT: triaccoppiato.

Il prodotto in TNT è creato per proteggere le zone più sensibili dalla sensazione di freddo eccessivo.

Busta in TNT coperta da brevetto.

**Bolla d'acqua interna** realizzata in materiale biaccoppiato in modo da rompersi esercitando una leggera pressione con le dita, antiurto.

**Contenuto:** urea, cloruro d'ammonio e acqua. Formula coperta da brevetto.

**Formato busta:** cm 14x18, tolleranza +/-5%



## INDICAZIONI E MODALITA' D'USO

La busta di **MEDICAL ICE** può essere efficacemente utilizzata per sostituire l'applicazione di ghiaccio o di acqua fredda. In caso di traumi, l'immediata applicazione di **MEDICAL ICE** allevia il dolore e determina il rapido raffreddamento della parte contrastandone la sintomatologia (ematomi, gonfiore, piccole emorragie).

Destinazioni d'uso:

- ☞ Settore ospedaliero: odontoiatria (dopo estrazioni dentali o altri interventi chirurgici del cavo orale), ortopedia e traumatologia, chirurgia, cardiologia radiologia (RX terapia, cobalto terapia)
- ☞ Settore sportivo e domestico: distorsioni, contusioni, traumi, ipertermie, colpi di calore.

Modalità d'uso:

- 1- Premere con entrambe le mani verso il centro fino a rompere la bolla interna contenente la soluzione refrigerante;
- 2- Agitare bene il sacchetto per miscelare il contenuto. Applicare sulla parte interessata.
- 3- Grazie alla miscela ottenuta, la temperatura raggiunge -4 °C ed arriva a 0°C in circa 20 minuti (da test di laboratorio condotti a 20°C).

## AVVERTENZE E CONSIGLI DI PRUDENZA

NON SONO IDENTIFICABILI PERICOLI PER LA SALUTE IN CASO DI NORMALI CONDIZIONI DI MANIPOLAZIONE.

Consigli di prudenza per le persone:

INALAZIONE

nessun rischio nelle normali condizioni di utilizzo

CONTATTO CON LA PELLE

nessun rischio nelle normali condizioni di utilizzo

CONTATTO CON GLI OCCHI

nessun rischio nelle normali condizioni di utilizzo

INGESTIONE DEL CONTENUTO

consultare il medico

INALAZIONE DEL CONTENUTO

respirare aria fresca

CONTATTO CON IL CONTENUTO

sciogliere con acqua fresca

CONTATTO CON GLI OCCHI

chiudere gli occhi per evitare di ferirsi con gli angoli del sacchetto

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille.



Simbologia secondo la norma UNI CEI EN ISO 15223-1:2017

## CONFEZIONE

Cartone da 25 buste

Pallet da 81 cartoni

Scadenza: 5 anni dalla data di produzione, riportata sul retro della busta

Lotto: indicato sul retro della busta

**USO ESTERNO-USO PROFESSIONALE**



Dispositivo Medico Classe IIA

Classificazione in base all'allegato IX paragrafo III regola 9 della Direttiva Europea 93/42/CEE e successive modifiche (inclusa la Direttiva 2007/47/CE)



Lombarda H S.r.l. Unipersonale - Amministrazione: Loc.Faustina - 20080 Albairate (MI) Tel. +39-02-94920509 Fax +39-02-94920515

Cod. Fisc.e Num. Reg. Imprese di Mi 09734150155 - R.E.A. MI 1313132

Sede legale: Via Volterra 9 - 20146 Milano - Cap.Soc. € 102.260,00 P.IVA IT09734150155

Commerciale: Tel. +39-0532-978497 Whatsapp: 340-3431234

<http://www.amedics.eu> - [commerciale@amedics.eu](mailto:commerciale@amedics.eu)