


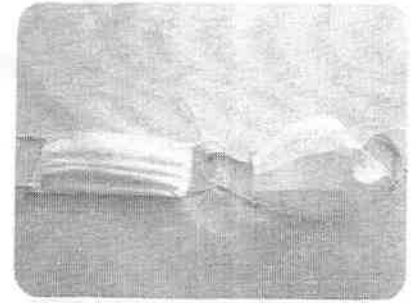

**MASCHERINA FILTRANTE AD USO DELLA COLLETTIVITA'
POLIPROPILENE 100% - ELASTICO IN GOMMA CON
PRESENZA DI LATEX**

**LA MASCHERINA È CONFORME ALLE INDICAZIONI RIPORTATE NELLA CIRCOLARE
DEL MINISTERO DELLA SALUTE N° 003752-P-18/03/2020 AD USO ESCLUSIVO DELLA
COLLETTIVITÀ COSÌ COME PREVISTO DALL'ART. 16 C.2 DEL DL N° 18 DEL 17/03/2020**

AVVERTENZE D'USO

Quando si respira, si parla, si tossisce, si starnutisce, ecc., si rilasciano quantità più o meno grandi di goccioline di secrezioni dalle mucose della bocca e del naso. Questa maschera è destinata a proteggere l'ambiente in cui opera il portatore della stessa. È destinata, pertanto, ad impedire che il portatore possa contaminare l'ambiente con secrezioni, fluidi orali e/o nasali.

È necessario però un corretto utilizzo della maschera è quindi necessario attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate di seguito.

In maniera sintetica:

- 1. DOPO E DURANTE L'UTILIZZO IL CORPO DELLA MASCHERA NON DEVE ESSERE TOCCATA IN ALCUN MODO;**
- 2. LE MANI VANNO DISINFETTATE (DISINFEZIONE COMPLETA DELLE MANI) DOPO LA RIMOZIONE DELLA MASCHERA;**
- 3. IN NESSUN MOMENTO UNA MASCHERA DEVE ESSERE APPESA INTORNO AL COLLO OPPURE RIUSATA;**
- 4. DOPO L'UTILIZZO LA MASCHERA DEVE ESSERE CONSIDERATA COME RIFIUTO POTENZIALMENTE INFETTO E QUINDI SMALTITO NELLA RACCOLTA INDIFFERENZIATA, PREOCCUPANDOSI DI EVITARE POSSIBILI FONTI DI CONTAMINAZIONE**

CONSERVAZIONE

Le maschere sono imballate in una busta di polietilene. È necessario conservare le stesse in locale coperto rispettando le seguenti condizioni: temperatura ambiente da +4°C a +40°C; umidità relativa dal 10% al 70% senza condensa.

SIMBOLOGIA

		
PRODOTTO NON STERILE	PRODOTTO MONOUSO	NON UTILIZZARE CON IMBALLO DANNEGGIATO

**IL PRODUTTORE NON È RESPONSABILE PER LA PRETESA DI PROTEZIONE DA
RISCHI DIVERSI DA QUELLI CONTEMPLATI IN TALE NOTA INFORMATIVA**