



Liquido disinfettante per superfici a base di alcol etilico

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO N° 20644

- VIRUCIDA
- BATTERICIDA
- FUNGICIDA
- Elimina il 99,99% BATTERI, FUNGHI E VIRUS



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ALLSEPT PLUS è un disinfettante per superfici a base di alcol etilico. Uccide il 99,99% di batteri, virus e funghi in pochi minuti.

APPLICAZIONE

ALLSEPT PLUS è un disinfettante per superfici indicato per la casa, per gli ambienti pubblici e in ambito sanitario. Utile anche nell'industria alimentare e horeca per soddisfare le procedure HACCP. Adatto per l'**area Sanità** (ospedali, case di cura, studi medici, ambulatori) e in generale per l'igiene pubblica (impianti sportivi, centri benessere, scuole etc).



MODALITA' D'USO E DILUIZIONE

Disinfezione di superfici dure, anche in ambito sanitario: dopo aver pulito la superficie da trattare con acqua e detergente, spruzzare il prodotto direttamente su di essa e spandere omogeneamente lasciando agire per circa 180 secondi/ 3 minuti. In caso di disinfezione di superfici a contatto con gli alimenti si consiglia di risciacquare.

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono: Etanolo 70,4 % (CAS n. 64-17-5) - Eccipienti ed acqua deionizzata q.b. a 100 g.

Allsept Plus



Allsept Plus



PROPRIETA'

ALLSEPT PLUS copre uno spettro d'azione molto ampio, ed è stato sottoposto ai severi test Europei, che hanno generato le seguenti conclusioni:

Norma UNI EN 13727:2015 presenta **ATTIVITA' BATTERICIDA** con un tempo di contatto di 1 minuto in presenza di sostanze interferenti in condizioni di pulito. Testato su:

- Staphylococcus aureus
- Pseudomonas aeruginosa
- Escherichia coli
- Enterococcus hirae

Norma UNI EN 13624:2013 presenta **ATTIVITA' FUNGICIDA** con un tempo di contatto di 1 minuto in presenza di sostanze interferenti in condizioni di pulito. Testato su:

- Candida Albicans
- Aspergillus brasiliensis

Norma UNI EN 13697:2015 + A1:2019 presenta **ATTIVITA' BATTERICIDA E FUNGICIDA** con un tempo di contatto di 3 minuti in presenza di sostanze interferenti in condizioni di pulito. Testato su:

- Staphylococcus aureus
- Pseudomonas aeruginosa
- Escherichia coli
- Enterococcus hirae
- Candida Albicans
- Aspergillus brasiliensis

Norma UNI EN 14476+A2:2019 presenta **ATTIVITA' VIRUCIDA** con un tempo di contatto da 1 a 2 minuti per:

- Adenovirus
- Murine norovirus
- Vacciniavirus.

Norma UNI EN 16777:2019 presenta **ATTIVITA' VIRUCIDA** con un tempo di contatto di 3 minuti per:

- Adenovirus
- Murine norovirus
- Vacciniavirus

In accordo alla Norma UNI EN 14476+A2:2019, ALLSEPT PLUS possiede **ATTIVITA' VIRUCIDA** (R>4) contro il:

- Poliovirus con tempo di contatto di 2 minuti.

INFORMAZIONI CHIMICO-FISICHE

CODICE PRODOTTO	15263	15269
CODICE EAN	8017841152647	8017841152708
CODICE ITF	08017841152630	08017841152692
CONFEZIONI	Flacone 750 ml x 12 pz	Tanica da 5 L x 4 pz

PACKAGING

ASPETTO	Liquido incolore
PROFUMO	Alcolico
PH TAL QUALE	8 - 9
PH DILUITO (1% acqua)	
PESO SPECIFICO	0.860 - 0.890 g/ml

NOTE:

Versione Novembre 2020

Presidio Medico Chirurgico n°20644

Titolare della registrazione: **I.C.E.FOR S.p.A.** sede legale C.so Cavliotti,30- 28100 Novara- Tel. 029792401.

Officina/e di Produzione: **I.C.E.FOR S.p.A.** Via Pablo Picasso, 16-20013 Magenta (MI)-Tel.029792401