

# SCHEDA TECNICA PRODOTTO

## technical data sheet



<b>Cod.Articolo/SKU</b>	TER06825A	<b>skill id:</b>	F0002883
<b>Descrizione articolo</b> <i>Item description</i>	TERMOMETRO CON CUSTODIA STERILIZZABILE		
<b>Marchio/Brand</b>	MY DOCT		
<b>Categoria/Category</b>	PARAFARMACIA		
<b>Sottocategoria</b> <i>Subcategory</i>	PARAFARMACIA		
<b>Cod. Doganale</b> <i>Customs tariff n.</i>	9025192090		

**EAN code**



### DESCRIZIONE PRODOTTO/Product Description

Termometro Clinico totalmente atossico e innocuo per l'ambiente, non contiene mercurio. Tempo di misurazione 4 minuti circa. Campo di misurazione 35.5 °C/42°C. Contiene metallo liquido composto da gallio, iodio e stagno. Per abbassare la temperatura, chiudere il termometro nella sua custodia, tenere fermo l'abbattitore tra pollice e indice e scuotere energeticamente mantenendo la punta rivolta verso il basso.

*L'immagine del prodotto ha solo scopo indicativo. Il colore dell'articolo potrebbe differire.*

### SPECIFICHE PRODOTTO/Product Details

#### CARATTERISTICHE

Contenuto	1 termometro con custodia
Pezzi per unità di vendita	1
Caratteristiche Prodotto	Atossico; Lavabile; Sterilizzabile
Composizione Dettagliata	GUSCIO: vetro - LIQUIDO TERMOMETRICO: gallio, indio, stagno - CUSTODIA: polistirene - ABBATTITORE: polipropilene
Colore	Trasparente
Istruzioni	Prima di effettuare la misurazione della temperatura, verificare che la colonnina del liquido termometrico si trovi leggermente al di sotto della prima tacca numerata (35°C). Per ottimizzare il tempo di risposta del termometro è opportuno evitare che la colonnina di fluido scenda troppo al di sotto di tale valore. Per far scendere la colonnina del liquido termometrico occorre tenerlo fermo e scuoterlo con movimenti ripetuti del polso. Scegliere la modalità di misurazione della temperatura: orale o ascellare seguendo le istruzioni; per evitare errori, la durata della misurazione deve essere di almeno 4 minuti. La temperatura del corpo umano è individuata dalla colonnina di fluido nella scala termometrica graduata impressa nel termometro. La colonnina è visibile inclinando leggermente il termometro sull'angolo e tenendolo parallelo al suolo.
Tipo Lavaggio Prodotto	Pulire il termometro passandolo con un panno asciutto e disinfettare la punta con etanolo (alcol etilico) o con una specifica soluzione disinfettante. In alternativa è possibile lavarlo con acqua fredda e sapone.

#### DIMENSIONE/CAPIENZA

Dimensione	Termometro: 12,3x1,2 cm - custodia: 18x1,7 cm
Larghezza (cm)	1.2
Lunghezza (cm)	12.3
Resistenza	35°C - 42°C

## SCHEDA LOGISTICA / Logistics Details

### UNITA' DI VENDITA / Sales unit specification

Dim. unità vendita in cm: <i>Sales unit size in cm</i>	<b>20x4,5x1,7</b>	Volume unitario in lt. <i>unit volume in lt.</i>	<b>0,22</b>	Pezzi x m3: <i>Pcs x mt3</i>	<b>4.587</b>
Peso Lordo (Kg): <i>Gross weight:</i>	<b>0,0390</b>	Peso Netto (Kg): <i>Net weight:</i>	<b>0,0380</b>	Pezzi per Pallet: <i>Pcs x pallet</i>	

### CONFEZIONE MINIMA / Inner unit specification

Numero unità di vendita: <i>Sales unit per Inner:</i>	<b>12</b>	Dimensioni in cm: <i>packing size in cm:</i>	<b>19x13,5x8</b>	Volume in lt. <i>packing volume:</i>	
Peso Lordo (Kg): <i>Gross weight:</i>	<b>0,4000</b>	Tara imballo (Kg) <i>Packing tare</i>		Strati su pallet: <i>lay per pallet:</i>	
Dim.pallet standard in cm: <i>Standard pallet size</i>		Num.inner per strato: <i>Inner per lay:</i>		Num.Inner per m3:	
Codice EAN Inner <i>Inner EAN code:</i>	<b>8000061568251</b>	Num Inner per pallet:			

### CONFEZIONE MASSIMA / Master unit specification

Numero unità di vendita: <i>Sales unit per Master:</i>	<b>72</b>	Dimensioni in cm: <i>packing size in cm:</i>	<b>42,5x20,5x18</b>	Volume in lt. <i>packing volume:</i>	
Peso Lordo (Kg): <i>Gross weight:</i>	<b>2,8000</b>	Tara imballo (Kg) <i>Packing tare</i>	<b>0,40</b>	Strati su pallet: <i>lay per pallet:</i>	
Dim.pallet standard in cm: <i>Standard pallet size</i>		Num.master per strato: <i>Inner per lay:</i>		Num.master per m3:	
Codice EAN Master <i>Master EAN code:</i>	<b>8000061968259</b>	Num master per pallet:			

### IMMAGINI AGGIUNTIVE / Additional Photos and details

